

Instruction d'utilisation

VACUETTE® SYSTÈME URINE

1



Préparer le matériel :
pot à urine avec canule
intégrée, le(s) tube(s)
VACUETTE®

2



Recueillir l'urine dans le
pot conformément au
protocole
correspondant

3



Retirer l'opercule de
protection située sur le
couvercle du pot à urine

4



Placer le tube
VACUETTE® dans
l'orifice du couvercle et
percuter le bouchon

5



Le remplissage est
automatique (système
sous vide) jusqu'au
volume prédéfini

6



Retirer le tube et
l'homogénéiser par 7 à
8 retournements
successifs.
Éliminer le pot à urine
après avoir recollé
l'opercule