


Utilisation du Lecteur NOVA



POINTS CLÉS

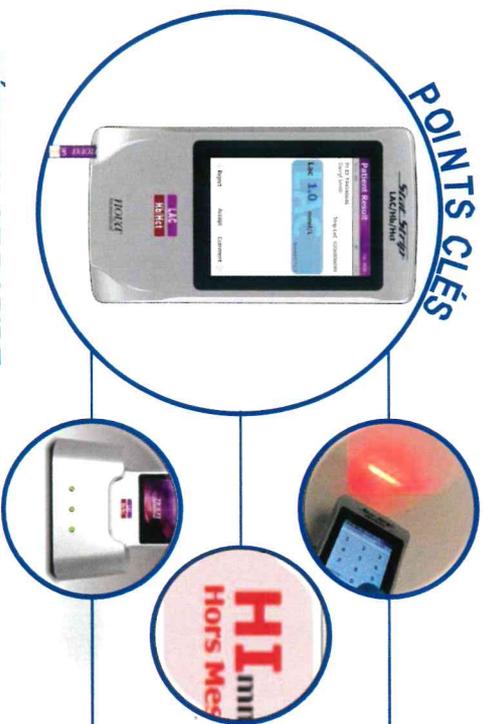

Lecteur codes à barres :
Projeter sur une surface puis diriger la ligne verte sur le code barre

LO/HI Résultats hors limite

6,5 g/dL < Hb < 22 g/dL ou 4,0 mmol/L < Hb < 13,7 mmol/L
20% < Hct < 65 %
0,30 < Lac < 20,0 mmol/L ou 3,0 mg/dL < Lac < 180 mg/dL

Connection au réseau, **vert** = OK

Clignote pendant le transfert de données

Chargement de la batterie, **vert** = terminé / **orange** = en cours

⚠️ Maintenir le contact avec le sang jusqu'au BIP

01 64 86 45 28 (h. ouvrées)
08 25 00 02 16 (24h/24 – 7j/7)
FR-support@novabio.com

Conservation après ouverture :
(entre 15-30°C)
Hémoglobine/Hématocrite : 3 mois
Lactate : 3 mois
Contrôles : 3 mois

DÉPANNAGE RAPIDE

Le signe apparaît sur l'écran en cas d'erreur et le motif de l'erreur s'affiche en haut à gauche de l'écran.

Erreurs d'analyse Cause

Erreur température Température hors limite

Erreur d'analyse Bandelette /Échantillon

Erreur de débit Volume échantillon insuffisant

Erreurs de transfert Cause

Transfert échoué Connexion / Transfert de data

Action

Adapter la T°C de fonctionnement : entre 1 - 40°C

Ne pas retirer la bandelette pendant que le test est en cours.

Utiliser une autre bandelette et recommencer le test.

Prélever à nouveau et maintenir le contact avec le sang jusqu'au BIP

Vérifier les réglages réseau - Replacer le lecteur sur sa base.

Contrôle hors intervalle : utiliser le mode "CQ", répéter le test avec un nouveau flacon CQ, puis un nouveau flacon de bandelettes